

製品サイズ/価格

製品番号	サイズ (cm×cm)	枚数/箱	標準販売価格/枚	標準販売価格/箱
293200	5×7.5	5	¥2,000/枚	¥10,000/箱
293100	4×30	5	¥5,600/枚	¥28,000/箱
293400	10×18	5	¥7,000/枚	¥35,000/箱

メピフォーム

届出番号:13B1X10015WC0004 医療用品(4)整形用品 一般医療機器
一般的名称:皮膚バリア粘着プレート

セーフタックテクノロジー

ソフトシリコンを使った特殊な粘着材を使用している為、
皮膚に優しく、剥がす際の皮膚損傷の危険性を軽減します。

SafetaC
TECHNOLOGY

コンジェルシートです。

と不織布で補強されているため、皮膚呼吸

ソフトシリコンの粘着性は、皮膚にやさし


Mölnlycke[®]

製造販売業者

メンリッケヘルスケア株式会社

東京都新宿区西新宿6-20-7 コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト

TEL : 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社 ウンドケア事業部

TEL : 03-6279-0991

MHC/PWVC-201901-05 MF10001-3

The symbol and the word mark are both registered trademarks or trademark pendings of Mölnlycke Health Care.

粘着性のあるシリコンジェルシート


mepiform[®]

instruction manual

取扱説明書

メンリッケヘルスケア株式会社

mepiform®

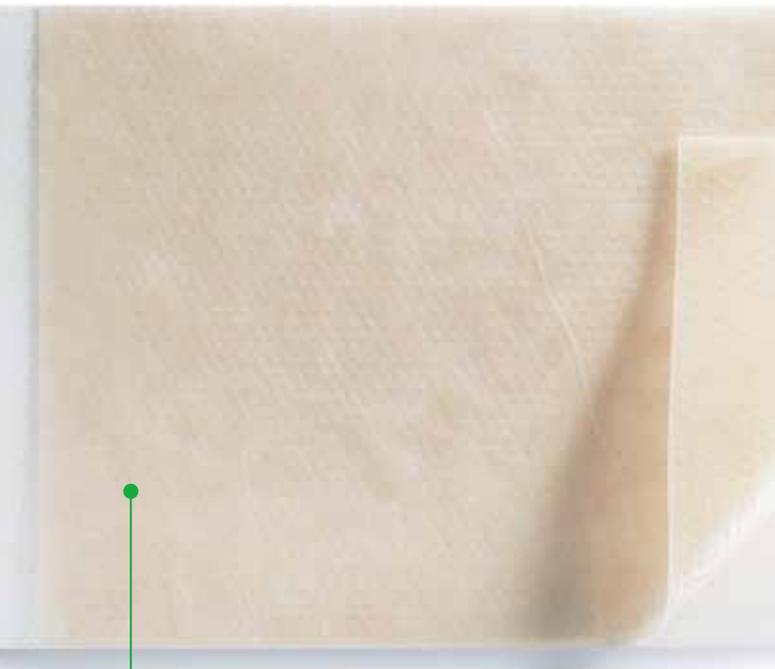

ポリウレタンフィルムと不織布で補強された外層
皮膚呼吸を妨げない通気性と、防水性を備えています。

about mepiform


メピフォームは、皮膚の保護を目的として使用するシリコンジェルシートの外層は、ポリウレタンフィルムを妨げない通気性と防水性を備えております。また「セーフタックテクノロジー *SafetaC* TECHNOLOGY」を用いたので、剥がす際の皮膚損傷の危険性や痛みを軽減します。

テープ等で固定する必要がありません。
体のどの部分にも密着します。
耐久性があり、再使用可能なのでとても経済的です。
薄くて柔らかいため、耳などの小さな部位にも使用可能。
カラーは、肌色。顔などにも安心してお使いいただけます。

II 使用方法


1. パッケージを開けて、メピフォームを取り出して下さい。

2. 傷あとの大きさや形に合わせて、切って使用できます。

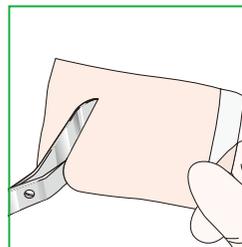

3. 適用部位を洗浄し、十分乾燥させて下さい。

4. 剥離フィルムを剥がし、シリコンジェルの装着面を適用部位に貼って下さい。
関節部位に使用する場合は、引っ張って貼らないで下さい。

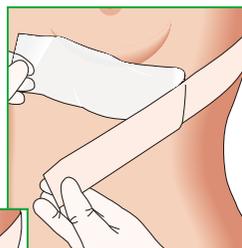

※肌色なので目立たず、また耳たぶ等の小さな部位にも切って簡便に使用できます。

II 用途 皮膚の保護

II 製品サイズ

製品番号	サイズ(cm)	枚数/箱
293100	4 × 30	5
293200	5 × 7.5	5
293400	10 × 18	5

II 取扱い方法

- メピフォームの連続使用時間は最長24時間まで貼付が可能ですが、1日1回を目安に適宜剥がして適用部位を観察し、洗浄して下さい。
- メピフォームは再使用が可能ですが、粘着力が弱くなってきたら、適宜交換して下さい。
- メピフォームは防水性です。シャワー浴や入浴が可能です。

II 使用上の注意

- 発疹、かゆみや皮膚浸軟がみられたら、症状が改善するまで使用を一時中止して下さい。
症状が改善したら、初めは1日の使用時間を短めにし、少しずつ長くするようにしてご使用下さい。
症状が消失しない場合は、医師等にご相談下さい。
- 開放創には使用しないで下さい。
- 抜糸前の縫合創には使用しないで下さい。
- 従来のシリコンジェルシートに比べ、粘着面に汚れ等が付着しにくい構造になっております。もしシートを洗う場合は、ぬるま湯又は皮膚刺激の少ない中性洗剤をご使用下さい。
洗剤成分が残るとかぶれの原因になりますので、シートを水またはぬるま湯等でよく洗って下さい。
- 誤飲を避けるため、幼児や高齢者の手の届かないところに保管して下さい。