

# Mepilex<sup>®</sup> Border Lite


メピレックス<sup>®</sup> ボーダー ライト

## 皮膚にやさしい薄いタイプの 一体型ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム

- ドレッシング材交換時の痛みや組織損傷を軽減します<sup>1, 2</sup>
- 適切な湿潤環境で創傷治癒を促進します
- シャワー浴可能

### ポリウレタン背面フィルム

- 水蒸気透過性
- 防水性
- バクテリア/ウィルスバリアー

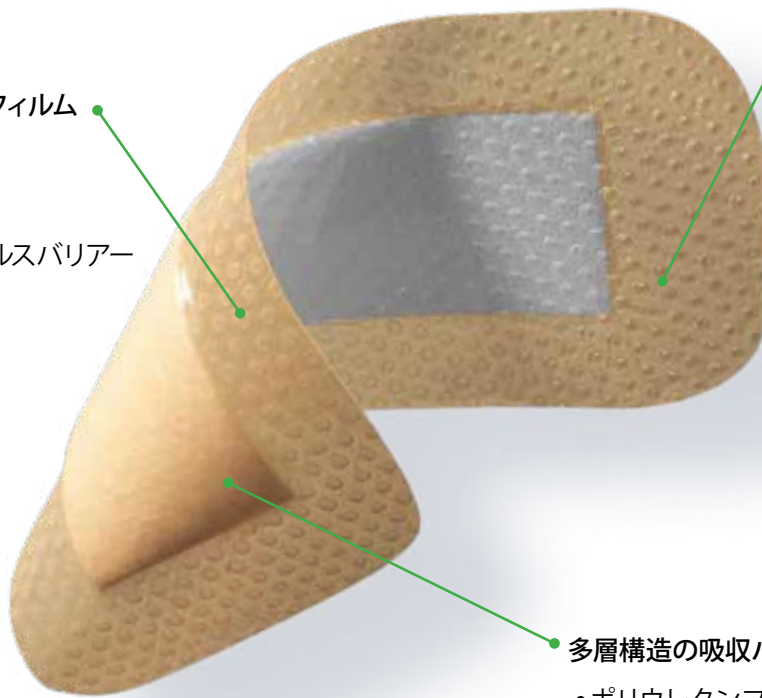

SafetaC<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

### セーフタック<sup>®</sup>テクノロジー による皮膚接触面

- ドレッシング交換時の痛みや組織損傷を軽減します<sup>1, 2</sup>
- 滲出液のある創部には固着せず、適度に皮膚に密着します
- セーフタック<sup>®</sup>のシーリング効果により、浸軟を軽減します<sup>3</sup>

### 多層構造の吸収パッド


- ポリウレタンフォームがすばやく滲出液を吸収します
- 不織布が滲出液を拡散。過剰な水蒸気の透過を促すことにより、滲出液の漏れを防ぎます

### セーフタック<sup>®</sup> テクノロジー

セーフタック<sup>®</sup> テクノロジーはメンリッケヘルスケアが開発したソフトシリコンを使用した粘着技術です。この技術を使用したドレッシング材は、ドレッシング交換時の患者様の痛みや創床及び創周囲皮膚の組織損傷のリスクを軽減します。また、皮膚の凹凸部にも密着するため、創縁をしっかりとシールし、創周囲の浸軟リスクも軽減します。

左図：従来の粘着剤（当社救急絆創膏との比較 自社データによる）

右図：セーフタック

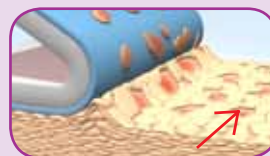


ドレッシング交換時に、粘着剤接触部に強い力がかかり、表皮剥離のリスクがあります。




ドレッシング交換時の表皮剥離のリスクを軽減します。

## メピレックス®ボーダー ライトの使用方法

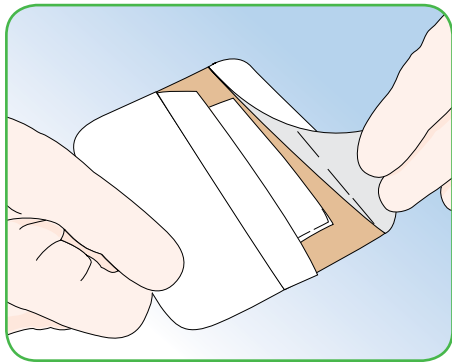

創部や周辺皮膚を洗浄し乾燥させます。  
創部の大きさに応じて創傷部の周囲を十分に覆うことができる適切な製品サイズを選び、剥離フィルムを剥がします。

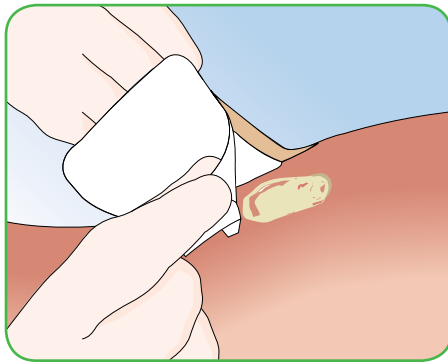

接着面を創面に向けて貼付します。伸ばしたり、端にしわが入らないよう注意して下さい。

## 皮膚にやさしい薄いタイプの 一体型ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム

メピレックス ボーダー ライトは薄いタイプの一体型ソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材です。滲出液を吸収し、創治癒に必要な湿潤環境を整えます。

皮膚接触面には、セーフタックを使用しているため、シーリング効果により滲出液の横漏れを防ぎ、浸軟を軽減し、ドレッシング材交換時の痛みや皮膚の組織損傷を軽減します。

## メピレックス®ボーダー ライトの特徴

- 適度な粘着力で皮膚に密着し、ドレッシング交換時の痛みと組織損傷を軽減します。
- 自着性なので、固定用テープ等は必要ありません。
- 防水性なので、シャワー浴が可能です。
- 薄くやわらかいため、患者様が快適にお使いいただけます。
- 創の状態に応じて、数日間お使いいただけます。

### メピレックス®ボーダー ライト

管理医療機器

局所管理フォーム状創傷被覆・保護材

認証番号: 224ADBZX00035000

#### 【保険適用】

種類: 特定保険医療材料

保険請求名: 皮膚欠損用創傷被覆材 メピレックス ボーダー ライト

保険適用範囲: 真皮に至る創傷用

適用期間: 2週間を標準として特に必要と認められた場合については3週間を限度とする

保険請求: 償還価格による

#### 【使用目的または効果】

創部の保護及び治癒の促進に用いること（真皮を越える創傷に用いるものを除く。）。



## 適応症例

メピレックス ボーダー ライトは、真皮に至る創傷（一般的な創傷、下腿・足潰瘍、褥瘡）に適しています。

## 注意

臨床的創感染を有する患者には慎重に使用してください。

「使用方法及び使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

## ※再使用禁止



## 製品サイズ

製品番号	ドレッシングサイズ cm	パッドサイズ cm	保険算定面積 cm <sup>2</sup>	枚/箱
281100	5 x 12.5	2.5 x 8.5	21.25	5
281200	7.5 x 7.5	4.5 x 4.5	20.25	5
281300	10 x 10	6.5 x 6.5	42.25	5
281500	15 x 15	11 x 11	121	5

製造販売業者

メンリッケヘルスケア株式会社

東京都新宿区西新宿6-20-7

コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト

TEL: 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社

ウンドケア事業部

TEL: 03-6279-0991

Safetac®, Mepilex® BorderLite, セーフタック®, メピレックス®ボーダー ライトはMölnlycke Health Careの登録商標です。

  
**Mölnlycke®**