



皮膚にやさしいソフトシリコン固定テープ

- 交換時の痛みや組織損傷を軽減します^{1,2}
- 皮膚の脆弱な患者様に適しています
- 体の様々な部位に密着します

セーフタックによる皮膚接触面

- 交換時の痛みや組織損傷を軽減します^{1,2}

テープ部

- 繊維が編まれているのでやわらかく高い追従性があります
- カットが容易です

ポリウレタン背面フィルム

- 通気性
- 防水性


Safetac
TECHNOLOGY

Safetac[®] テクノロジー

セーフタックは、メンリッケヘルスケアが開発したソフトシリコンを使用した粘着技術です。セーフタック粘着技術を使用したドレッシング材は、ドレッシング交換時の患者様の痛みや創床及び創周囲皮膚の組織損傷のリスクを軽減します。また、皮膚の凹凸部にも密着するセーフタック粘着材は、創縁をしっかりとシールするので、創周囲の浸軟リスクも軽減します。

左図：従来の粘着剤(当社救急絆創膏との比較 自社データによる)

右図：セーフタック

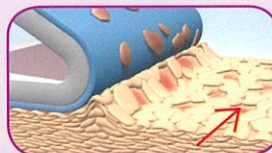


ドレッシング交換時に、粘着材接触部に強い力がかかり、表皮剥離のリスクがあります。




ドレッシング交換時の表皮剥離のリスクを軽減します。


使用方法

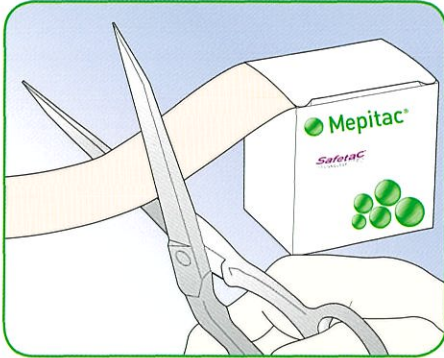

皮膚が清潔で乾燥していることを確認してください。軟膏などを使用している場合は、洗浄してください。はさみでテープを必要な長さに切ってください。

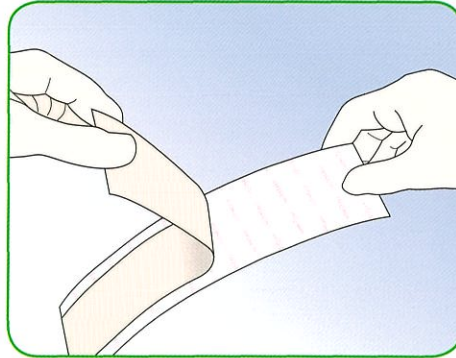

剥離フィルムからテープを剥がしてください。

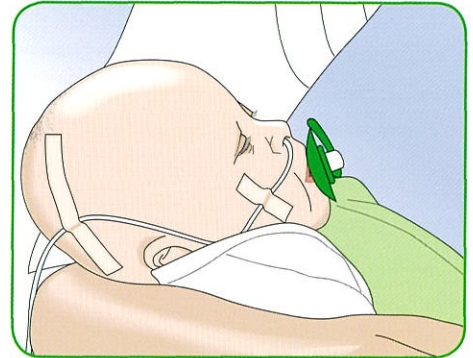

メピタックは、伸ばさないように貼ってください。

皮膚にやさしいソフトシリコン固定テープ

メピタックは、皮膚にやさしく剥がす際の痛みが軽減できます。皮膚の脆弱な患者様、継続してテープを使用する患者様に適した固定テープです。(例：新生児、高齢者、透析患者様など)

メピタック®の特徴

- テープ交換時の痛みや組織損傷を軽減します
- 体のどの部位にも密着します
- 通気性
- 防水性

適用

チューブ、IVカテーテル、被覆材などを固定するテープです。チューブなど医療機器の下に貼付し、皮膚を保護することも可能です。

使用上の注意

メピタックは湿度が高い環境（保育器、高熱の患者様など）において粘着力が弱まる可能性があります。動脈カテーテルの固定には使用をお控えください。



製品サイズ

製品番号	サイズ cm	巻/箱
298300	2 x 300	1
298400	4 x 150	1

輸入販売元

メンリッケヘルスケア株式会社

東京都新宿区西新宿6-20-7

コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト

TEL: 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社

ウンドケア事業部

TEL: 03-6279-0991

Safetac®、Mepitac®、セーフタック®、メピタック®はMölnlycke Health Careの登録商標です。

