

Mextra® Superabsorbent メクストラ®


多量の滲出液を吸収し、創傷治癒をサポートする高吸収性ドレッシング材

- 高い保水力¹
- 吸水力が向上しました²
- やわらかく追従性があります¹
- 創周辺部を保護します¹

UPGRADE




メクストラ®を構成する4層の吸水&保水構造

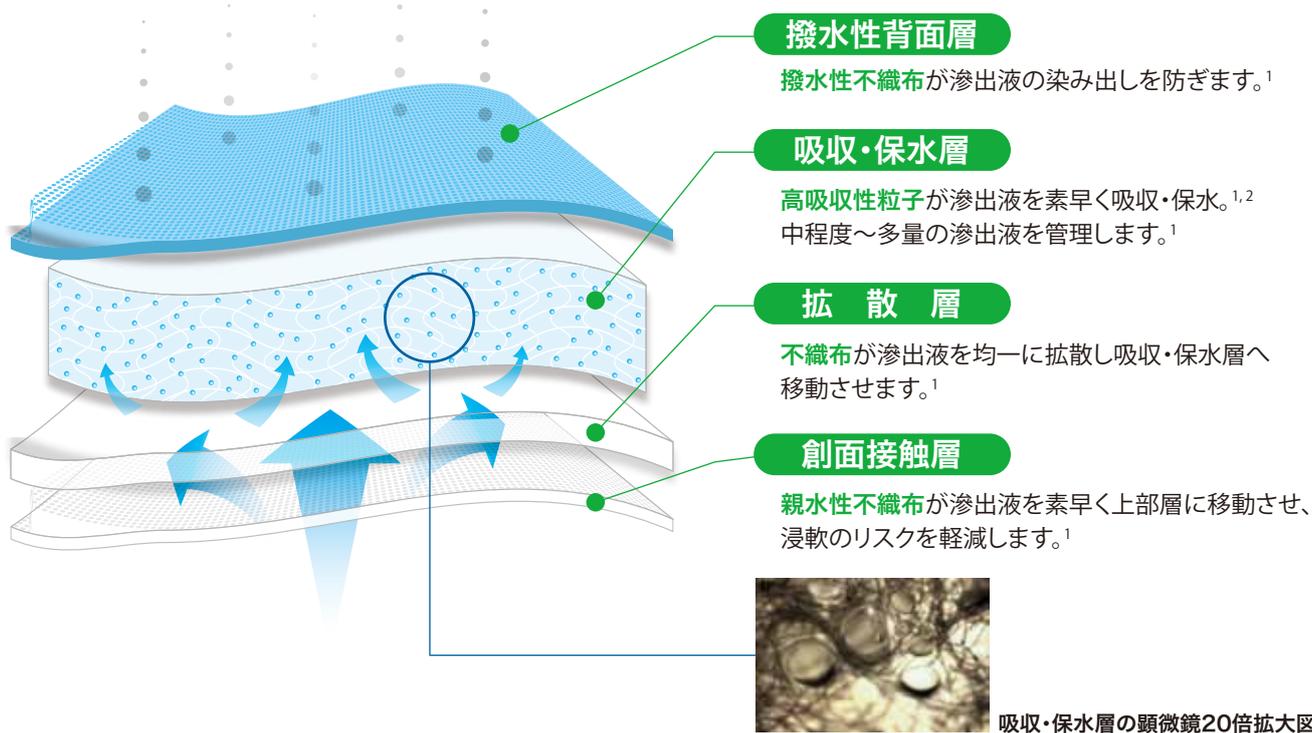

メクストラは多量の滲出液管理に
適しています




セーフタック®のコンタクトレイヤーとの併用ができます
メビテル、メビテルワン、メビレックストランスファーを一次ドレッシング
として貼付した上にメクストラを適用

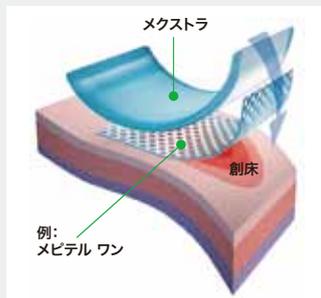


メクストラの固定例
伸縮性包帯チュビファーストで
固定




メクストラ® の使用方法

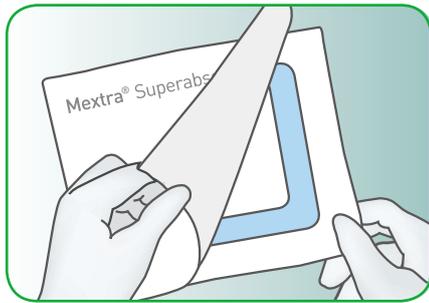

1. 通常の方法により生理食塩液等で創傷部を十分洗浄してください。創傷の大きさに応じ、創傷部の周囲を十分に覆うことができる適切な製品サイズを選んでください。

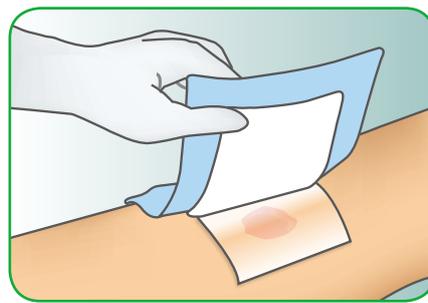

2. 本品の白いパッド(創面接触層)を創面に向けて被覆する。このとき、パッドが乾燥した創周囲皮膚に2cm以上被るように貼付してください。必要に応じて、創傷部にメピテル ワン、メピテル等一次ドレッシングを貼付します。

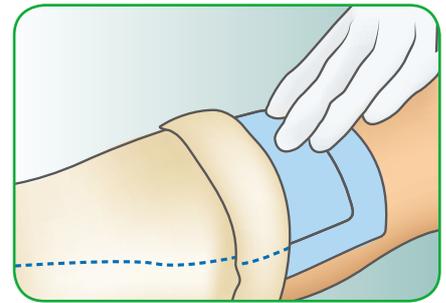

3. チュビファーストや固定用テープを用いてメクストラをしっかりと固定してください。弾性包帯下でもご使用いただけます。

メクストラ® の特徴

- 滲出液の漏れや浸軟のリスクを軽減します¹
- ドレッシング材の交換回数を減らします¹
- 滲出液の染み出しを防ぎます¹
- 患者様に快適にお使いいただけます¹
- 慢性創傷の滲出液に含まれる過剰なタンパク分解酵素を素早く創部から吸収し保水層で閉じ込めます^{1, 3, 4}

交換時期

メクストラを適用した創傷部を定期的に観察して下さい。数日間被覆できますが、創傷部の状態に応じて、またはドレッシング材が飽和状態になる前に交換してください。

メクストラ® の適応例



静脈性下腿潰瘍



自壊創



離開創



熱傷



販売名:メクストラ
一般医療機器
手術用被覆・保護材
(熱傷被覆・保護材)
届出番号:13B1X10015WC0008

「使用方法及び使用上の注意」等については添付文書をご参照下さい。

*再使用禁止

メクストラ®

製品番号	外形サイズ cm	パッドサイズ cm	枚/箱
610000	12.5×12.5	10×10	10
610100	12.5×17.5	10×15	10
610200	12.5×22.5	10×20	10
610300	17.5×22.5	15×20	10
610400	22.5×27.5	20×25	10
610500	22.5×32.5	20×30	10

参考文献

1. Tickle, J., Fletcher, J. Mextra Superabsorbent made easy. Wounds UK 2012; 8(4): 1-4
2. Mölnlycke Health Care Laboratory report no: PD-522474, 2016 (unpublished)
3. Wiegand, C., Hipler, U.C. In vitro evaluation of MMP binding capacity of a superabsorbent dressing and the reduction of collagenase activity. Poster presentation at European Wound Management Association conference, Copenhagen, Denmark, 2013
4. Eming, S., Smola, H., Hartmann, B., Malchau, G., Wegner, R., Krieg, T., Smola-Hess, S. The inhibition of matrix metalloproteinase activity in chronic wounds by a polyacrylate superabsorber. Biomaterials 2008; 29(19): 2932-2940

製造販売業者
メンリッケヘルスケア株式会社
東京都新宿区西新宿6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
TEL: 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ
メンリッケヘルスケア株式会社
ウンドケア事業部
TEL: 03-6279-0991