

BARRIER® Champ de hanche avec Drisite® Plus

- Design tridimensionnel intelligent pour un drapage optimal pendant la chirurgie de la hanche
- Drisite Plus pour un contrôle exceptionnel des liquides au cours des interventions en milieu humide
- Matériau ultra-résistant dans la zone critique
- Matériaux totalement imperméables pour éviter les pénétrations de liquide au cours de tous types d'interventions
- Porte-tubes résistants et intégrés






1 Dépliez la housse de table et placez-la sous la jambe du patient.



2 **Option 1** : placez une champ adhésif sous la jambe en orientant le bord adhésif vers la tête. Décollez la bande de protection. Placez une seconde champ adhésif par-dessus la première en orientant le bord adhésif du côté opposé au patient.



3 Repliez l'un des bords autour de la jambe. Repliez le second champ sur le pied et collez le bord adhésif sur la jambe.

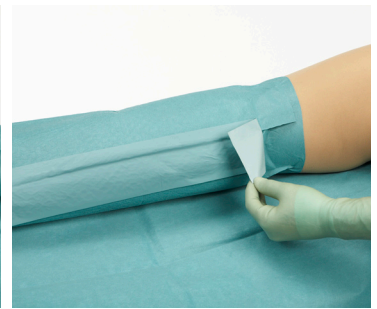

4 Faites adhérer les bords autour du pied et le long de la jambe à l'aide de bandes adhésives.



5 **Option 2** : couvrez la jambe avec une stockinette et fixez-la à l'aide de bandes adhésives.



6 Faites passer la jambe dans l'ouverture. La bande adhésive située sous le champ offre une sécurité supplémentaire.



7 Tirez le champ vers la tête du patient et fixez l'ouverture élastique dans la position appropriée.



8 Dépliez le champ par-dessus le cadre d'anesthésie.

	Code stérile
60600	Champ pour hanche 230/300 × 330 cm, ouverture 18 × 22 cm élastique, emballé
	Composants ProcedurePak®
70600	Champ pour hanche BNS 230/300 × 330 cm, ouverture 18 × 22 cm élastique, emballé